

WEGO 威高

- 个性化设计
- 安全可靠
- NMPA认证



显微操作管

Micromanipulation Pipettes



至臻品质 威高智造

注册证号:鲁械注准20212180652

显微操作管



剥卵针/操作针 Denuding/Handling Pipette

- 用于去除卵母细胞外的卵丘颗粒细胞或用于胚胎转移
- 由外径1.5mm的硼硅酸盐玻璃机械控制而成
- 配套符合人体工程学设计的轻便型手柄使用

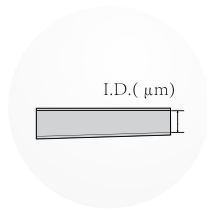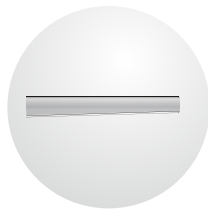


固定针 Holding Pipette

- 用于固定卵母细胞或胚胎
- 标准接触面和吸力, 保持卵母细胞的稳定

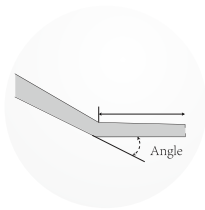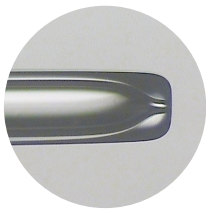

显微注射针 ICSI Pipette

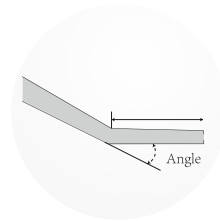

- 易于吸取精子将其注入卵母细胞
- 标准锥形更容易控制过程
- 针尖的锐度可轻松穿透透明带和卵膜, 减少对卵母细胞的不良影响

卵子激活液 (实验室科研用)

使用说明:

1. 取0.5ml卵子激活液加入中央皿中, 用培养油覆盖, 37°C (不需要通二氧化碳) 温育至少2小时。
2. ICSI后, 将卵子放入上述液体中培养15分钟。
3. 培养后, 至少清洗卵子6次, 然后再培养16-18小时后, 进行卵子受精情况评估。



包装规格: 1ml/瓶



山东威高瑞生医疗器械有限公司

地址: 山东省威海火炬高技术产业开发区威海路1号

咨询电话: 400-646-6666

电话: 0631-5715912

传真: 0631-5716403

邮编: 264210

网址: www.wegoruisheng.com

邮箱: rsxshscb@weigaogroup.com